

GUIA DE APLICAÇÃO - POSIÇÃO DE PÉ FRALDAS - ABRI-FORM



1 Dobre a fralda a meio longitudinalmente com a zona em tecido não tecido virada para fora. Não toque no interior da fralda.



2 Puxe suavemente a fralda entre as pernas da frente para trás, posicionando a extremidade da fralda à altura da linha da cintura do utilizador.



3 Prenda a parte de trás da fralda com a sua anca. Ajuste cuidadosamente a parte frontal entre pernas, evitando dobras que possam causar desconforto no utilizador.



4 Fixe os adesivos inferiores no sentido ascendente em ambos os lados assegurando que a fralda está justa e confortável.



5 Forme uma prega na extremidade superior da banda da fralda para garantir um ajuste mais eficaz.



6 Fixe os adesivos superiores no sentido descendente sobre a prega.



7 Verifique a correta colocação dos elásticos na zona entre pernas de forma a que a colocação da fralda fique confortável.